

H-1033 Budapest, Szőlőkert utca 4.


Tel: +36-1-437-8120, +36-1-437-8121, Fax: +36-1-437-8122,

www.multicomkft.hu, e-mail: multicomkft@multicomkft.hu,

Szociális riasztó a MultiCom Kft.-től

Szabad frekvenciasávban működő vezeték nélküli nővérhívó rendszer diszpécser munkahellyel és személyi hívóval, amely az átjátszó állomások segítségével nagy területi lefedettséget biztosít épületen belül.

(A berendezések és a szoftverek a MultiCom Kft. saját fejlesztései)

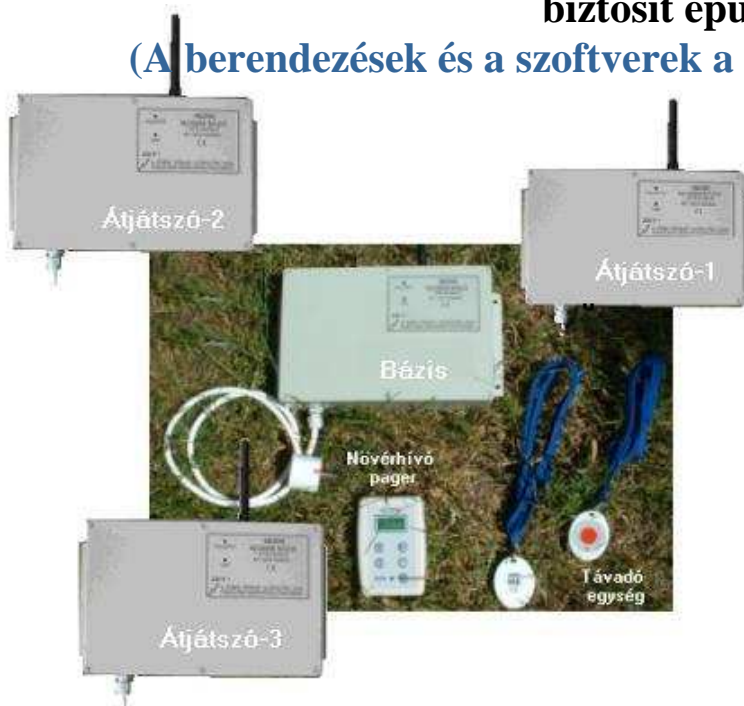

H	Időpont	Hangos mód	2012.05.02. 14:19:32	Kilépés
082	14:19:15	Kiss Jánosné T:123	104	
084	14:18:29	Koczka Andriáné T:109	205/A	
072	16:07:57	Kiss Jánosné T:123	104	
077	16:07:44	Reiblt Erzsébet T:136	115	
073	16:07:41	Pichler Károlyné Anna T:114	209/B	
078	16:07:39	Mulnar Jánosné Edit T:104	200/B	
080	16:07:37	Nagy Sandorné Anna T:114	209/B	
079	16:07:35	Papp Józsefné Mária T:108	204/B	
190	16:07:31	Makó Györgyné Erzsébet T:115	1x/A	
390	15:22:22	Darabos Jánosné Bilke	206/B	

Felhasználási terület: (épületen belül)

- időotthonokban
- kórházakban
- nevelőotthonokban belső vész hívóként

A rendszer lehetséges elemei:

- távkapcsolók (1000 db különböző kód)
- Átjátszó állomások (8 db)
- Bázisállomás (1 db)
- Nővérpult (PC), diszpécser szoftverrel
- Hordozható nővérhívó készülék (1...több)

Távkapcsolók:

Az idős emberek személyes jelzőkészüléke. Kiemelt tulajdonsága, hogy adáskor automatikusan bejelzi az alacsony telepfeszültséget. Az alacsony telepfeszültségű jelzés kiemelten jelenik meg a monitoron.

E tulajdonsága az üzembiztonságot nagymértékben emeli, mivel a jelzés hatására a telep cseréje időben megtörténik.



Nővérpult (PC):

Számítógépes központi állomás, diszpécser szoftverrel.

A számítógépen folyamatosan rögzítésre kerülnek a rendszerben előforduló vészjelzések, valamint a rendszer elemeinek üzemállapot jelzései.

A monitoron megjelenik a jelzőgomb azonosító száma a hozzá tartozó adatokkal együtt (név, fénykép, szobaszám, telefonszám stb.). Jelzés esetén a számítógép hangjelzést ad.

A számítógép hangjelzése akkor kapcsol ki, ha a képernyőn ráklikkelünk a megjelenő jelzésre, (nyugtázzuk a jelzést), vagy a hordozható nővérhívó készüléken nyomják meg a NYUGTA-gombot.

A nem nyugtázott jelzések **kiemelten** jelennek meg.

072	16:07:57	Kiss Jánosné	104
		T:123	
077	16:07:34	T:136	115
		Pichler Károlyné	
073	16:07:30	T:114	200/B
078	16:07:39	Molnár Jánosné	200/B
		Edit	
		T:104	
		Nagy Sándorné	204/B
		T:114	
079	16:07:35	Mária	204/B
		T:108	

Dátum	Idő	Esemény	Prognózis	Állomási	Paraméter
2012.05.02.	14:28:12	Állomásterminál	1	10.90V	
2012.05.02.	14:28:13	Állomásterminál	1	11.02V	
2012.05.02.	14:28:18	Állomásterminál	1	11.50V	
2012.05.02.	14:28:19	Távközi bejelzés	001	001	
2012.05.02.	14:28:19	Hordozható nővérhívó PC	001	Nővérpult	
2012.05.02.	14:28:19	Állomásterminál	1	11.02V	
2012.05.02.	14:28:33	Állomásterminál	1	Állomásterminál	
2012.05.02.	14:28:39	Állomásterminál	1	11.90V	
2012.05.02.	14:28:39	Állomásterminál	1	Állomásterminál	

Hordozható nővérhívó (személyi hívó) készülék:

A személyhívó egy kisméretű hordozható adó-vevő készülék, amely az átjátszó állomások rádiós jelzéseit veszi és a beépített kijelzőjén megjelenik a hívó azonosítója.

Főbb tulajdonságai:



- Beépített akkumulátorral rendelkeznek, az előlapon jelzi a töltést, illetve a feltöltött állapotot
- 2-soros, 8-digites alfanumerikus kijelző
- Megjeleníti a saját akkumulátorának töltöttségi állapotát
- A távkapcsolók jelzéseit az átjátszó állomásokon keresztül veszi.
- Megjeleníti a távkapcsolók azonosító számát (ha be van állítva a szobaszámot is)
- A számítógép a beérkező távkapcsoló riasztás hatására a hordozható készülék felé elküldi a távkapcsolóhoz rendelt szobaszámot
- 32 beérkező jelzést képes eltárolni, a beérkezés sorrendjében
- A jelzések **helyi nyugtázását a központi számítógépre jelzi rádiósan**, így a számítógépen nyugtázásra kerül a riasztás
- A készüléken lekérdezhető a telep állapota. "Telep alacsony" kijelzés, automatikus kikapcsolás



Főbb műszaki paraméterek:

Üzemi frekvencia: 869.2125 MHz

Kimeneti teljesítmény: 10 mW ERP

Telepek élettartama a távkapcsolókban: 2 év / napi két jelzés esetén

Amennyiben a berendezés felkeltette érdeklődését, úgy az elérhetőségeink valamelyikén keressen minket bővebb információért, és kereskedelmi ajánlatért.

www.multicomkft.hu

e-mail:multicomkft@multicomkft.hu

Tel: (1)-437-8120, 437-8121

Fax: (1)-437-8122